



LubriMaster Gleitgel (wasserlöslich)

Technisches Datenblatt
Version: 30. September 2022

Gleitmittel, was sind das für Produkte?

Gleitmittel/Gleitgele sind Medizinprodukte zur Anwendung auf der Haut und im Intimbereich. Sie erfüllen die strengen Anforderungen der europäischen „Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte“ und des deutschen „Medizinproduktegesetzes“. Ihre Qualität wird durch die ausgewählten Rohstoffe, kontrollierte Fertigungsprozesse und umfangreiche Prüfungen garantiert. Unsere Gleitmittel sind auf Haut- und Schleimhautverträglichkeit positiv getestet, die Kondomverträglichkeit ist nachgewiesen.

Wir haben zwei verschiedenen Arten von Gleitmitteln im Sortiment,

- Gleitmittel auf Wasserbasis und
- Gleitmittel auf Silikonbasis.

Erstere bestehen hauptsächlich aus Wasser. Sie verursachen kein „klebriges Gefühl“, sind vollständig mit Wasser abwaschbar, können aber eintrocknen.

Die Gleitmittel auf Silikonbasis sind besonders sparsam im Gebrauch, haben eine langanhaltende Wirkung, lassen sich aber schlechter, d.h. nur mit warmem Wasser und Seife von der Haut entfernen.

Was bewirken die Gleitmittel?

Wie allgemein bekannt, sind Gleitmittel zähe Flüssigkeiten, die wie ein „Schmierstoff“ wirken. Sie vermindern die Reibung, die Gleitfähigkeit wird verbessert. Dadurch kann

- Schmerzen und leichten Verletzungen bei sexuellen Handlungen vorgebeugt,
- bei Anwendung mit Kondomen deren Sicherheit unterstützt und
- das sexuelle Empfinden, besonders bei Scheidentrockenheit, wesentlich verbessert werden.

Unsere Gleitmittel verbinden sich mit der körpereigenen Feuchtigkeit zu einem natürlichen „Schmierstoff“ nach der Devise: „Feuchtes wird noch feuchter.“ Gleitmittel anzuwenden kann also von medizinischem Nutzen sein, aber auch wesentlich dazu beitragen, das Sexualleben zu bereichern.

Wie wendet man die Gleitmittel an?

das Auftragen und Verteilen

Unsere Gleitmittelverpackungen (Flaschen, Tuben) ermöglichen über den Verschluss ein gezieltes Dosieren. Man lässt das Gleitmittel einfach auf das Körperteil, das am erigierten Penis abgerollte Kondom oder das Sex-Toy tropfen und verteilt es dann mit den Fingern. Man kann das Gleitmittel auch auf die Hand/Finger tropfen und damit dann dort auftragen und verteilen, wo es gewünscht ist.

Empfehlenswert ist, sich vorher aus hygienischen Gründen die Hände zu waschen.



Welche Menge an Gleitmittel zur Anwendung kommt, ist von dem Anwendungszweck und dem individuellen Empfinden abhängig, es kann ausprobiert werden. Wird zu wenig Gleitmittel aufgetragen, ist nicht richtig „geschmiert“ und man kann nachdosieren, zu viel Gleitmittel ist eigentlich nur unangenehm.

mit Kondomen

Das Gleitmittel wird auf das bereits am erigierten Penis abgerollte Kondom aufgetragen, auf die Kondomspitze, oder man verteilt es über die Kondomoberfläche, wie man will. *Bitte beim Verteilen vorsichtig vorgehen, damit das Kondom nicht durch z.B. spitze Fingernägel beschädigt wird.*

Bitte unbedingt auch die Hinweise in der Gebrauchsanweisung des Kondoms beachten.

mit Sex-Toys

Alle unsere Gleitmittel auf Wasserbasis sind für die Verwendung mit Vaginalkugeln, Vibratoren und den anderen Sex-Toys geeignet.

Die Gleitmittel auf Silikonbasis dürfen nicht mit Sex-Toys aus Silikon oder mit anderen Gegenständen aus Silikon verwendet werden, da sie die Oberfläche dieser Produkte beschädigen könnten. Denn Silikon kann Silikon herauslösen.

Wie können die Gleitmittel entfernt werden?

von der Haut oder Schleimhaut

Es ist nicht notwendig, die Gleitmittel zu entfernen. Denn, auch wenn sie nach der Anwendung auf der Haut oder Schleimhaut verbleiben, „richten sie keinen Schaden an“.

Sollen sie doch entfernt werden, dann können die Gleitmittel auf Wasserbasis rückstandsfrei mit Wasser abgewaschen werden. Die Gleitmittel auf Silikonbasis werden mit warmem Wasser und Seife entfernt. *Von Vaginalspülungen ist abzuraten.*

Gibt es sonst noch etwas zu beachten?

Schwangerschaftsverhütung und Schutz vor Infektionen

Gleitmittel sind **keine** empfängnisverhütenden Mittel, enthalten **keine** Spermiziden Wirkstoffe und bieten auch **keinen** Infektionsschutz.

bei Kinderwunsch

Gynäkologen empfehlen, Gleitmittel bei Kinderwunsch nur sparsam einzusetzen oder zur Sicherheit gleich ganz wegzulassen, da sie die Empfängnis erschweren könnten.

wenn das Gleitmittel Probleme bereitet

Bei der Suche nach unverträglichen, z.B. allergieauslösenden Stoffen, kann man sich vor der Anwendung in der Kennzeichnung des Produktes unter „Ingredients (INCI):“ informieren. Treten Unverträglichkeiten auf, bitte das Produkt wie beschrieben entfernen und gegebenenfalls einen Arzt konsultieren.

COMPET MEDICAL AG

Auslieferungslager EU
Max-Stromeyer-Str. 17
DE – 78467 Konstanz

Tel. + 49 7531 361 07 90
Fax + 49 7531 361 07 91

info@competmedical.com

COMPET MEDICAL AG

Höhenweg 2b
CH – 8834 Schindellegi

Tel. +41 71 680 00 60
Fax +41 71 680 00 64

www.competmedical.com